

Linsväska

Linsväska m etui

ARTIKELNR

94324UN (Bas)

VARUMÄRKE

ACUVUE

FÖRPACKNINGSTORL.

100 ml

UPPGIFTSLÄMNARE

JJSV Norden AB



Ingredienser

Innehållsämnen: Alexidin 0,00016 %, polykvaternium-1 0,0003 %, borsyra, natriumtetraborat-dekahydrat, TETRONIC 904, dinatriumedetat (EDTA), trinatriumcitratdihydrat, natriumklorid och renat vatten.

Marknadsbudskap

EXCEPTIONELL DESINFEKTION OCH KOMFORT HELA DAGEN. Multi-Purpose desinfektionslösning rengör, sköljer, desinfekterar, förvarar, tar bort ytbeläggningar inklusive fett och proteiner, och återfuktar. För användare av silikonhydrogel och mjuka kontaktlinser.

Dabas produktklassificering

509715276567 / Non food -- Non food -- Non food -- Non food

Märkning

Övrig regulatorisk
märkningsinformation:

Lot och expiratedate

Ursprung



Tillverkningsland: ⓘ
Kina

Ursprungsområde: ⓘ
CE 0483

Förvaring

Temperatur (°C):	Min: 5 °C Max: 25 °C
------------------	-------------------------

Total hållbarhet (dagar):	720
---------------------------	-----

Hållbarhet efter öppning:	90
---------------------------	----

Förvaringsinstruktioner:	Stäng flaskan ordentligt genast efter användning. Förvaras mellan 5 °C till 25 °C.
--------------------------	--

Användningsinstruktioner:	Viktigt – Läs denna bipacksedel noga och bevara den. INSTRUKTIONER FÖR DESINFEKTION AV KONTAKTLINSER 1. Tvätta händerna med varmt vatten och tvål, och torka händerna med en luddfri handduk för att minska risken för infektion. 2. Ta ut kontaktlinserna. Rengör och desinfektera dina linser genom att placera 3 eller flera droppar av lösningen på linsens ena sida. 3. GNUGGA försiktigt utan att använda cirkelrörelser, från mitten ut till kanterna i 2 till 4 sekunder. 4. Vänd på linsen och upprepa steg 2 och 3. 5. SKÖLJ båda sidorna på linsen i 5 sekunder med färsk lösning. Placera linserna i ett
---------------------------	--

rent linsetui och fyll
på med lösning.
Stäng etuiet så att
det sluter tätt. 6.
BLÖTLÄGG linserna i
minst 6 timmar för
desinfektion,
rengöring, och
borttagning av
proteinavlagringar.

Basnivå • GTIN 05050474105799

ARTIKELIDENTITET

Artikelns identitet, GTIN:	05050474105799
Målmarknadsområde:	Sverige
Artiklavisering:	FINAL
Leverantörens artikelnummer:	94324UN
Konsumentartikel:	Ja
Är artikeln en logistisk enhet:	Ja
Fakturerbar enhet, indikator	Ja
Beställningsbar artikel, indikator	Ja

BESKRIVNING

Artikelkategori:	Linsvätska
Artikelbeskrivning:	ACUVUE™ RevitaLens Linsvätska med etui 100ml
Produktnamn:	Linsvätska m etui
Varumärke:	ACUVUE
Undervarumärke:	RevitaLens
Reglerat produktnamn:	ACUVUE™ RevitaLens 100 ml
Förpackningsstorlek:	100 ml

KOMPLETTERANDE ARTIKELIDENTITET

Leverantörens artikelnummer	94324UN
-----------------------------	---------

KONTAKT

Kontakt GLN: 7300009054404

Kontaktamn: JJSV Norden AB

Kontaktadress: Kolonnvägen 45, 170 67 Solna

Typ av kontakt: Kundsupport

MARKNADSFNFORMATION

Sökbegrepp E-handel ACUVUE; revitalens;linsväska

Övrig Information Viktigt – Läs bipacksedel noga och spara den. Du kan behöva läsa den igen.

MARKNADSBUDSKAP

Marknadsbudskap: EXCEPTIONELL DESINFEKTION OCH KOMFORT HELA DAGEN. Multi-Purpose desinfektionslösning rengör, sköljer, desinfekterar, förvarar, tar bort ytbeläggningar inklusive fett och proteiner, och återfuktar. För användare av silikonhydrogel och mjuka kontaktlinser.

Kort marknadsbudskap: EXCEPTIONELL DESINFEKTION OCH KOMFORT HELA DAGEN.

Rengör, desinfekterar, återfuktar

ARTIKELINFORMATIONSDATUM

Dokumentets giltighetstidpunkt: 2019-12-01

LEVERANS OCH KÖP:

Tillgänglighetstidpunkt: 2020-01-05

Första leveranstidpunkt: 2020-01-10

Artikel lanseringstidpunkt: 2020-01-15

SÄSONG

Är artikeln en säsongsvare: Nej

GPC PRODUKTKLASSIFICERING

Produktklass, kod: 10000526

INGREDIENSFÖRTECKNING

Ingrediensförteckning: Innehållsämnen: Alexidin 0,00016 %, polykvaternium-1 0,0003 %, borsyra, natriumtetraborat-dekahydrat, TETRONIC 904, dinatriumedetat (EDTA), trinatriumcitratdihydrat, natriumklorid och renat vatten.

TILLVERKNINGSLAND

Tillverkningsland: Kina

INGREDIENSFÖRTECKNING FÖR ICKE LIVSMEDEL

Ingrediensförteckning för icke-livsmedel: Alexidin 0,00016 %; polyquaternium-1 0,0003 % (PQ-1); borsyra; natriumborat-dekahydrat; Tetronic 904; dinatriumedetat (EDTA); trinatriumcitratdihydrat; natriumklorid och renat vatten.

KONSUMENTINSTRUKTIONER

Förvaringsinstruktioner för konsument:

Stäng flaskan ordentligt genast efter användning.
Förvaras mellan 5 °C till 25 °C.

Användningsinstruktioner

Viktigt – Läs denna bipacksedel noga och bevara den. INSTRUKTIONER FÖR DESINFEKTION AV KONTAKTLINSE 1. Tvätta händerna med varmt vatten och tvål, och torka händerna med en luddfri handduk för att minska risken för infektion. 2. Ta ut kontaktlinserna. Rengör och desinfektera dina linser genom att placera 3 eller flera droppar av lösningen på linsens ena sida. 3. GNUGGA försiktigt utan att använda cirkelrörelser, från mitten ut till kanterna i 2 till 4 sekunder. 4. Vänd på linsen och upprepa steg 2 och 3. 5. SKÖLJ båda sidorna på linsen i 5 sekunder med färsk lösning. Placera linserna i ett rent linsetui och fyll på med lösning. Stäng etuiet så att det sluter tätt. 6. BLÖTLÄGG linserna i minst 6 timmar för desinfektion, rengöring, och borttagning av proteinavlagringar.

TEMPERATUR

Högsta förvaringstemperatur:

25 °C

Lägsta förvaringstemperatur:

5 °C

LIVSLÄNGD

Total hållbarhet (dagar):

720

Hållbarhet efter öppning:

90

HÄLSA

Övrig regulatorisk märkningsinformation:

Lot och expirationsdatum

Innehåller latex:

Nej

VÅRDPRODUKTER

Artikelegenskap, kod:

STERILE

DATUMMÄRKNING

Format för datummärkning, kod:	yyyymm
Typ av datum på förpackningen:	Märkt med bäst-före-datum

DATAMÄRKNING

Databärartyp:	EAN 13
---------------	--------

SKATT

Skattesats	25%
Skattetyyp:	Mervärdesskatt

GARANTI

FÖRPACKNING/PLATTFORMSTYP:

Förpacknings-/kollityp:	Flaska
Villkor för förpackningsmaterial, kod:	Återvinningsavgift betald
Förpackningsvikt:	20 gram
Förpackningsfunktion:	Garantiförseglad

VIKT

Artikelns bruttovikt:	148 gram
Jämförmängd färdigvara:	100 milliliter
Jämförmängd kod:	Per liter
Variabelmåttvara:	Nej

NETTOINNEHÅLL

Nettoinnehåll värde:	100 milliliter
----------------------	----------------

MÅTT

Artikelns bredd:	65 mm
------------------	-------

Artikelns djup:	33 mm
-----------------	-------

Artikelns höjd:	160 mm
-----------------	--------

STAPLING

Staplingsriktning	HORIZONTAL
-------------------	------------

STAPLINGSBARHET

Staplingsbarhet	4 basförpackningar i höjd
-----------------	---------------------------

JJSV Norden AB

ORG. NR.	TELEFON	ADRESS
556624-3258	08-594 210 00	Box 4035 , 169 04, Solna

GLN
7300009054404